

Эстетик-Гнатофлекс

Высокоэластичные многоразовые силиконовые формы для воспроизведения жевательной поверхности из воска, пластмассы и керамики.



Гнатофлекс из особого силикона, сохраняет форму и термостойкость до 250°C. Перенос поверхности антагонистов посредством тонкой формовочной детали толщиной всего лишь 0,5 мм.



Эластичность Гнатофлекса гарантирует самую высокую устойчивость формы и долговечность.



Бугорки и фиссуры Гнатофлекса точно воспроизводятся в воске, пластмассе или керамике. При этом получают гладкую поверхность с высоким блеском.

40 с
для восковой поверхности



Эстетически функциональную форму Гнатофлекса при восковом моделировании мостовидного протеза можно индивидуально моделировать.

90 с
для пластмассовой поверхности



При использовании пластмассы или композита получают поверхность с высоким блеском.

180 с
для керамической поверхности



Гарантируется индивидуальное наложение слоев по Вашим требованиям к цвету и форме. Свободный выбор керамической массы.

Гнатофлекс Вы можете также использовать в зуботехнической лаборатории как основную форму для индивидуального моделирования.



Колпачки, как обычно, изготавливают из воска или пластмассы.



Гнатофлекс наполняют моделировочным воском.

Артикулятор блокируют на соответствующей жевательной поверхности на 0,5 мм, чтобы компенсировать толщину Гнатофлекса.



Как только воск начинает желатинизоваться...



...на культю надевают Гнатофлекс.

Выбирайте сами: многоточковый контакт в точной артикуляции, минимальный контакт или прецизионный 0,5 мм внешний контакт.



Артикулятор закрывают, жевательные поверхности фиксируют каплей воска к колпачку.



Таким же образом поступают со второй опорной коронкой мостовидного протеза.



Соответствующее оригиналу воспроизведение силиконовой формы в воске с высоким блеском.



В качестве базиса для жевательной поверхности промежуточного звена используется восковая вспомогательная часть.



Готовая окклюзионная сторона общего мостовидного протеза. Общий вид Эстетик-Гнатофлекса.



Смыкание зубов-антагонистов с восковым мостовидным протезом с язычной стороны.



Вид со щечной стороны показывает центральные контакты фиссурно-бугоркового соотношения.



Контакты смыкания мостовидного протеза с зубами-антагонистами, обнаруживаемые с помощью артикуляционной бумаги.

Жевательные поверхности из любой пластмассы без дополнительной обработки.



1 На каркас, подготовленный обычным способом, наносят выбранную пластмассу (дентин) для коронок или мостовидных протезов.



2 Сначала Гнатофлекс без изолянта заполняют на участке бугорков резцовой, а затем дентинной массаами. Часть устанавливают в мостовидный протез.



3 Артикулятор закрывают. Теперь можно приступить к полимеризации светоотверждаемой пластмассы, чтобы зафиксировать прикус.



4 После этого мостовидный протез снимают, наносят контактные пункты и окончательно полимеризуют.

Керамические поверхности с точным воссозданием цвета – просто, как никогда



5 На подготовленный с помощью опакера керамический мостовидный протез наносят дентинную массу. На силиконовой части тонким слоем распределяют керамический изолянт для Гнатофлекса.



6 Гнатофлекс сначала заполняют резцовой, а затем дентинной массаами. При этом резцовую массу распределяют от бугорков к краю. При использовании керамики артикулятор необходимо блокировать больше, чем на 0,5 мм, чтобы компенсировать усадку.



7 Гнатофлекс накладывают и соединяют с каркасом керамической массаой. Остаточное моделирование проводят резцовой и дентинной массаами или их смесью – в зависимости от цвета зуба.



8 Керамическую массу осушивают флисовой салфеткой или феном для сушки волос. Теперь Гнатофлекс осторожно снимают. Мостовидный протез снимают, наносят контактные пункты и обжигают обычным способом.

Эстетик-Гнатофлекс

16	1 ⁴ / ₅	2 ⁴ / ₅	26	Зуб
16D	1 ⁴ / ₅ D	2 ⁴ / ₅ D	26D	Размер D
16C	1 ⁴ / ₅ C	2 ⁴ / ₅ C	26C	Размер C
16B	1 ⁴ / ₅ B	2 ⁴ / ₅ B	26B	Размер B

Набор из 36 компонентов (12 различных форм размеров B, C, D)

Кат. № 429 Å003 6

Изображения оригинального размера

47B	46B	45B	44B	34B	35B	36B	37B	Размер B
47C	46C	45C	44C	34C	35C	36C	37C	Размер C
47D	46D	45D	44D	34D	35D	36D	37D	Размер D
47	46	45	44	34	35	36	37	Зуб

bredent

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

